

GELFLEX & GELFLEX FAST

ALGINATES POUR EMPREINTES DE PRÉCISION - FORMULE À L'ALGINATE DE POTASSIUM



Prise normale

Prise rapide



Parfum pomme

PROPRIÉTÉS DE GELFLEX «PRISE NORMALE»

Temps de mélange	45 s.
Temps total de travail	2 min 15
Temps de prise	3 min
Reproduction des détails	20 µ



Parfum abricot

PROPRIÉTÉS DE GELFLEX «PRISE RAPIDE»

Temps de mélange	30 s.
Temps total de travail	1 min 15
Temps de prise	1 min 45
Reproduction des détails	20 µ

COMPOSITION

Gelflex : parfum pomme
Gelflex Fast (ex Ortho): parfum abricot

INDICATIONS

Respecter toujours la proportion de 1 mesure de poudre pour une demi-mesure d'eau.
Pour mesurer la poudre, remplir la cuillère-doseuse et araser avec la spatule, sans tasser.
Mélanger poudre et eau pendant 45 sec. pour le Gelflex et 30 sec. maximum pour le Gelflex Fast.

Retrouvez les mentions obligatoires de Gelflex en page 108.

Réf.	Désignation article	Conditionnement
6998D	Prise normale : vert	Sachet de 454 g
6999E	Prise rapide : bleu (Fast : ex Ortho)	Sachet de 454 g
6064N	Boite hermétique	À l'unité

DISPOSITIF MÉDICAL

CONDITIONNÉ SOUS AZOTE
- SANS POUSSIÈRE -